



АППАРАТ МАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
БЫТОВОЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ И ТАЙМЕРОМ



ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 450071,
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
Г. УФА, УЛ. РОСТОВСКАЯ, 18
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 450092,
Г. УФА, УЛ. РАБКОРОВ, 20/1, Д/Я №166

ТЕЛЕФОН: 8(347) 254-96-36
8(962) 519-25-85
ФАКС: 8(347) 254-96-36
GENERATION-UFA@MAIL.RU
WWW.ZEVSONIK.RU
WWW.BLIZORUKOST.COM



ЗЕВСОНИК – УНИКАЛЬНЫЙ МАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ, МАКСИМАЛЬНО
АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
МАГНИТОТЕРАПИЯ ХОРОШО ПЕРЕНОСИТСЯ ВСЕМИ ПАЦИЕНТАМИ: ОТ
ПОДРОСТКОВ ДО ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА.


ЗЕВСОНИК

Научно-производственный институт «ГЕНЕРАЦИЯ» предлагает Вашему вниманию выпускаемый нашим предприятием, бытовой магнитно-акустический офтальмологический аппарат «ЗЕВСОНИК», эффективно применяемый для улучшения остроты и четкости зрения.

В основе действия аппарата «ЗЕВСОНИК» лежит использование научно обоснованного метода магнитотерапии, который позволяет эффективно и безопасно снимать утомление глаз, улучшать остроту и четкость зрения в домашних условиях. Аппарат может использоваться как отдельно, так и в комплексном лечении заболеваний, значительно увеличивая эффект от применяемых медикаментов.



СЕРТИФИКАЦИЯ

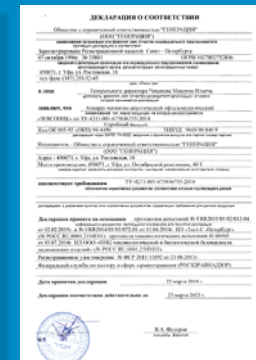

VITRUM VISION PLUS

Лечебный эффект аппарата ЗЕВСОНИК эффективно дополнит прием витаминно-минерального комплекса Vitrum Vision Plus, в результате чего значительно улучшается кровоток, ускоряется процесс выздоровления, улучшается острота зрения, мягко стимулируется функция слезопродукции, нормализуется эластичность и тонус сосудов, исчезают или значительно уменьшаются субъективные симптомы заболевания.

Одновременное использование аппарата ЗЕВСОНИК и витаминно-минерального комплекса Vitrum Vision Plus окажет значительный положительный терапевтический эффект!



Применение аппарата ЗЕВСОНИК в домашних условиях избавит Вас от изнурительных очередей в поликлинике. Сама процедура магнитотерапии проста и комфортна, не требует специального обучения и медицинской подготовки.

ЗЕВСОНИК идеально подходит для лечения всех членов семьи и использования в профилактических целях.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!**

О ПРОБЛЕМЕ ЗРЕНИЯ

Проблема снижения зрения стоит остро во всем Мире, в настоящее время каждый третий житель Земли имеет те или иные глазные заболевания, большинство из которых проявляются уже в детском и подростковом возрасте. Если зрение человека начинает ухудшаться, то это становится огромной проблемой, как для него самого, так и для родственников (особенно, если речь идет от детей с плохим зрением).

По статистике, если оба родителя имели проблемы со зрением, то вероятность развития того же зрительного нарушения у ребенка очень высока!

Наиболее распространенными офтальмологическими проблемами являются близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), амблиопия и астигматизм. Данные заболевания могут быть вызваны как одной, так и сочетанием нескольких причин одновременно. Кроме того известно огромное количество других глазных патологий и нарушений.

Без должного внимания и лечения подобные заболевания могут привести к частичной или полной утрате зрения!

Правильным шагом в улучшении и предупреждении проблем со зрением может стать использование аппаратов «ЗЕВСОНИК», «ЗЕВСОНИК-М» и «Визуалон», которые предназначены для лечения глазных заболеваний путем комплексного воздействия щадящего магнитного и акустического поля, направленного не только на глазное

яблоко, но и на прилегающие зоны головы, участвующие в кровоснабжении органа зрения. За счет оптимального расположения индукторов осуществляется комбинированный подход к физиотерапии глазных болезней и достигается высокая результативность лечения!



ДЕЙСТВИЕ



- 1** Воздействие непосредственно на глазное яблоко. Способствует улучшению локальной микроциркуляции и обменных процессов.
- 2** Воздействие на височную область. Усиливает местное кровоснабжение и мягко стимулирует функцию слезопродукции.
- 3** Воздействие на проводящие пути зрительного анализатора. Усиливает нервные импульсы и положительно влияет на функциональное состояние нервной ткани зрительного центра.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



- Близорукость
- Дальнозоркость
- Астигматизм, в т.ч. КЗС (компьютерный зрительный синдром)
- Первичная открытоугольная глаукома с нормализованным или умеренно повышенным внутриглазным давлением в 1-3 стадии
- Воспалительные заболевания глаз (халазион, блефарит)
- Бактериальные кератиты
- Герпетические кератиты

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Острые воспалительные заболевания глаз;
- Закрытоугольная глаукома;
- Первичная открытоугольная глаукома с высоким ВГД (выше 32 единиц по Маклакову);
- Злокачественные новообразования;
- Хронические соматические и психические заболевания в стадии декомпенсации;
- Резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга;
- Заболевания кожи лица.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ЗЕВСОНИК:



- Ускоряется процесс выздоровления
- Улучшается острота зрения
- Расширяется поле зрения
- Снимается отечность роговицы
- Снижается внутриглазное давление (ВГД)
- Снижается систолическое артериальное давление
- Исчезают или значительно уменьшаются субъективные симптомы заболевания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Амплитудное значение индукции пульсирующего магнитного и акустического поля на поверхности каждого из индукторов, мТл	3.-5
Формы импульса	прямоугольная
Частота магнитного поля	5–10 Гц
Диапазон изменения длительности импульсов	от 20 до 50 мс (с отклонением $\pm 20\%$)
Период изменения частоты	8 \pm 2
Электропитание от сети переменного тока	220В 50 Гц (с отклонением $\pm 20\%$)
Потребляемая мощность	Не более 10ВА
Средняя наработка на отказ	Не менее 2000 ч.
Размеры - блока управления - блока питания	135x63x35 80x50x90
Масса изделия	Не более 1 кг
Средний срок службы устройства	Не менее 3 лет
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев